


# OCLUSOR SEPTAL MULTIFENESTRADO AMPLATZER™ O “CRIBIFORME”

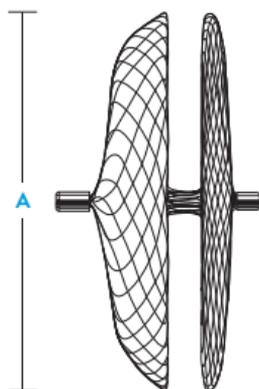

## Medición y Selección del Dispositivo

Una vez que la comunicación más céntrica se haya cruzado, haga mediciones para determinar la distancia al borde exterior de la fenestración más alejada. El tamaño del dispositivo seleccionado debe ser 2:1 de esta medición.

**Distancia más corta desde la comunicación a la raíz aórtica o distancia desde la comunicación al orificio de la vena cava superior (mm)**

**Tamaño sugerido del oclisor cribiforme Amplatzer™ (mm)**

>20	40
17,5-20	35
15-17,4	30
12,5-14,9	25
9-12,4	18
<9	No implantar dispositivo

La información incluida en el presente documento es PARA DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA fuera de EE. UU. Verifique la situación regulatoria del dispositivo en áreas donde la marca CE no es la regulación en vigor.

## Información de pedidos

Contenido: 1 ocluser

Código de Producto n.º	Tamaño del dispositivo/diámetro del disco auricular derecho (mm) (A)	Longitud de cintura (mm)	Tamaño de vaina mínimo recomendado
9-ASD-MF-018	18	3	8 F; Curva de 45°
9-ASD-MF-025	25	3	8 F; Curva de 45°
9-ASD-MF-030	30	3	8 F; Curva de 45°
9-ASD-MF-035	35	3	9 F; Curva de 45°
9-ASD-MF-040	40	3	10 F; Curva de 45°

## Accesorios recomendados

Accesorio	Página
Sistema de liberación Amplatzer™ TorqVue™ 45°	38
Sistema de intercambio Amplatzer™ TorqVue™ 45°	39
Guía Amplatzer™ (9-GW-002)	48